

# AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de **BLESSURES GRAVES** ou de **MORT** lors de l'utilisation de ce déambulateur *staxi*<sup>®</sup>, veuillez suivre les présentes consignes de sécurité:



## Les passagers doivent s'installer sur le déambulateur par le côté

- Lever l'accoudoir afin de s'installer par le côté et jamais par le devant du déambulateur. (Voir étiquette sur la poignée)



## Les passagers doivent pouvoir se tenir droit sans assistance une fois assis

- S'asseoir droit, entièrement adossé au dossier du déambulateur avec accoudoirs abaissés et pieds sur les repose-pieds.
- Ne pas utiliser ce déambulateur pour de jeunes enfants ou pour des personnes n'ayant pas un bon contrôle de la partie supérieure du thorax. Les passagers doivent pouvoir se tenir droit sans assistance.

## L'accompagnateur doit demeurer présent quand le déambulateur est occupé

- Ne jamais laisser un passager seul. Les passagers ne sont pas en mesure de manipuler le déambulateur et ils seraient par conséquent en danger en cas d'urgence.



## Ne pas dépasser le poids maximal de transport du déambulateur

- La limite du poids de transport du déambulateur est de 227kg. Ce poids maximal comprend le poids du passager, plus tout bagage, chargement ou accessoire placé sur le déambulateur.

## Éviter les renversements et les chutes

- Un (1) seul passager à la fois.
- Éviter les trottoirs et les bordures. En cas de nécessité, *staxi*<sup>®</sup> recommande de reculer en inclinant avec précaution le déambulateur vers l'arrière puis en le guidant doucement au dessus de l'obstacle.
- Ne pas essayer de faire demi-tour ou de manœuvrer à 360° sur une pente, une rampe ou un pan incliné.
- Ne jamais se mettre debout sur les repose-pieds. Les repose-pieds doivent uniquement être utilisés par le passager correctement assis.
- Ne jamais pousser ce déambulateur sur des escalators ou des escaliers.

## Utilisation requise de la ceinture de sécurité (si le déambulateur en est équipé)

- Toujours utiliser la ceinture de sécurité, si elle est installée. Pour plus d'informations sur les options de ceintures de sécurité, veuillez contacter *staxi*<sup>®</sup>.

## Manœuvrer le déambulateur avec précaution

- Comme tout autre déambulateur ou chaise roulante, il convient de manœuvrer le déambulateur *staxi*<sup>®</sup> occupé avec un soin particulier dans des passages étroits ou encombrés. Veillez à ne pas coincer le bras ou la main du passager entre l'accoudoir et le mur ou les arêtes des portes, lorsque le déambulateur passe par des portes ou des espaces étroits. Veillez à ce que les pieds du passager ne se coincent ni se prennent dans des objets se trouvant devant ou sur les côtés du déambulateur.

## Ne transporter que des passagers

- Ne pas transporter de bagages sur le siège ou sur les genoux du passager. Les objets peuvent tomber lorsque le déambulateur se déplace dans des endroits inclinés. Utiliser le porte-bagage situé sous le siège pour transporter des bagages.
- Ne jamais installer d'enfants assis sur ce déambulateur sur un siège-auto.

## Vérifier régulièrement les pièces fonctionnelles du déambulateur

- Vérifier les pièces fonctionnelles du déambulateur une fois par mois. Veuillez consulter les vérifications obligatoires dans la section « Entretien » du manuel de l'utilisateur.

Avant usage, lire le MANUEL D'UTILISATION. Veuillez le télécharger à partir du site Web: [www.staxi.com](http://www.staxi.com)



**For more information on security in English, visit our web site.**

**Para obtener información de seguridad en español, visite nuestro sitio web.**

**Wow-Care™**

**Tél:** 1-866-969-1463  
or 1-866-WOW-1463

**E-mail:** [Wow-Care@staxi.com](mailto:Wow-Care@staxi.com)

**Site Web:** [www.staxi.com](http://www.staxi.com)

**staxi**<sup>®</sup>

**Rolling out Excellence**

# ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de **LESIÓN GRAVE** o **MUERTE**, siga estas normas para un uso seguro de la silla de transporte **staxi**<sup>®</sup>:



### Los pasajeros deben acceder a esta silla desde el lateral

- Levante el apoyabrazos para acceder desde el lateral, nunca desde la parte delantera de la silla. Consulte la etiqueta en el manillar.



### Los pasajeros deben poderse sentar erguidos sin ayuda

- Siéntese erguido, completamente apoyado en el respaldo de la silla, con los apoyabrazos bajados y los pies en el reposapiés.
- No use esta silla para niños pequeños ni aquellos que no tengan control del tronco superior. Los pasajeros deben poder mantenerse erguidos por sí mismos sin ayuda.

### El asistente debe mantenerse junto a la silla cuando esté ocupada

- Nunca deje a un pasajero desatendido. Los pasajeros no pueden mover la silla y corren riesgos en caso de una emergencia.

### No sobrecargue la silla

- El límite de peso total para esta silla es de 227kg. Esto incluye el peso del pasajero más cualquier bolsa, carga o accesorio cargados en la silla.

### Evite vuelcos y caídas de la silla

- Solo un (1) pasajero.
- Evite subir bordillos o salientes. En caso de que deba hacerlo, **staxi**<sup>®</sup> recomienda ir hacia atrás bajando suavemente las ruedas traseras sobre el obstáculo y después ir marcha atrás de forma controlada.
- No intente dar la vuelta ni hacer una maniobra de 360° en pendiente, rampa o inclinación.
- No se ponga de pie sobre los reposapiés. Estos han de usarse únicamente por un pasajero sentado adecuadamente.
- Nunca utilice esta silla sobre escaleras mecánicas o escaleras.

### Use siempre cinturones de seguridad (cuando estén instalados)

- Use siempre el cinturón de seguridad, si se dispone de uno. Para obtener más información sobre las opciones de cinturones de seguridad, póngase en contacto con **staxi**<sup>®</sup>.

### Tenga cuidado al maniobrar la silla

- Como con todas las sillas de transporte y sillas de ruedas, se debe poner especial atención al maniobrar una silla **staxi**<sup>®</sup> ocupada a través de espacios estrechos o concurridos. Tenga cuidado de no pellizcar los brazos o manos del pasajero entre los apoyabrazos y paredes o bordes de puertas al pasar por una puerta estrecha o espacios ajustados. Evite que los pies de los pasajeros queden atrapados o que se den con objetos en la parte delantera o en los laterales de la silla.

### Para transporte de pasajeros únicamente

- No transporte equipaje en la silla ni el regazo del pasajero. Los artículos podrían caerse en las pendientes. Use el compartimento para equipaje debajo de la silla para llevar maletas.
- Nunca coloque niños en asientos para automóvil sobre esta silla.

### Compruebe los componentes funcionales de forma periódica

- Inspeccione los componentes funcionales de la silla cada mes. Consulte la sección Mantenimiento en el manual del propietario para ver las comprobaciones recomendadas.

Antes de usarla por primera vez, lea el MANUAL DEL OPERADOR. Puede descargarlo en: [www.staxi.com](http://www.staxi.com)



**For more information on security in English, visit our web site.**

**Pour plus d'informations de sécurité en français, visitez notre site Web.**

**Wow-Care**<sup>™</sup>

**Tel:** 1-866-969-1463 or 1-866-WOW-1463

**Correo electrónico:** [Wow-Care@staxi.com](mailto:Wow-Care@staxi.com)

**Sitio web:** [www.staxi.com](http://www.staxi.com)

**staxi**<sup>®</sup>

**Rolling out Excellence**

