

Produto	Cadeira de corredor AC020
---------	---------------------------

Representante autorizado europeu	Fabricante
MedEnvoy Global B.V. Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123 2595 AM The Hague Países Baixos	Staxi Corp 424 Williamson- Zebulon Rd Williamson GA 30292 EUA

1.0 Classificação e utilização prevista

A cadeira de corredor Staxi é um dispositivo médico de classe I ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/745 (para MDR). Código EMDN: V080502.

A cadeira de corredor Staxi destina-se a ser utilizada no transporte de passageiros não ambulatoriais do seu equipamento pessoal de assistência à mobilidade para o seu lugar num avião, e vice-versa, sob a direção de 2 assistentes. A utilização típica envolve um único episódio de transporte de duração transitória (menos de 1 hora).



Fig 1. Cadeira de corredor Staxi

2.0 Códigos de componentes da cadeira – incl. cores

AC020-X			
---------	---	--	--

3.0 Instruções para utilização segura:

- Antes de utilizar, inspecione visualmente a cadeira para confirmar que todos os componentes estão bem fixados e que as 4 rodas rolam suavemente. Em seguida, certifique-se de que o travão está a funcionar corretamente, verificando se a cadeira não rola para a frente quando o travão está engatado.
- A utilizar apenas para o transporte de passageiros da porta do avião para o assento.
- Se o processo de transferência exigir a passagem de uma saliência ou fenda para o avião, utilize as barras de elevação dianteiras e traseiras para passar a fenda.
- Utilize sempre dois assistentes para efetuar as transferências, um na parte da frente e outro na parte de trás da cadeira de transporte.
- Os assistentes devem certificar-se de que a cadeira não se move durante a transferência
- Transferência de passageiros de acordo com o Procedimento Operacional Padrão de transferência da empresa responsável
- **O arnês, as duas correias das coxas e a correia da perna inferior devem ser fixados antes de qualquer movimento.**
Não utilizar se algum dos elementos acima referidos estiver em falta ou com defeito
- Para deslocar a cadeira
 - Desengate a barra de paragem do travão amarela
 - Desengate o travão da barra do guiador (em movimento): Aperte a barra do travão e empurre.
 - Ative o travão (parar): Solte a barra do travão.
 - A barra de paragem do travão amarela engata-se automaticamente quando o travão é acionado.

- **Não desengate a barra de travão amarela ou a barra do travão de mão enquanto transfere o passageiro.** Assegure-se de que o arnês e todas as correias estão bem apertados antes de desengatar qualquer elemento do sistema de travagem
- Capacidade em termos de peso: 227 kg.
- Mantenha a cadeira afastada de chamas abertas e de fontes de calor intenso.
- Os assistentes devem permanecer junto da cadeira quando esta estiver ocupada.
- Não sobrecarregue a cadeira.
- Evite os tombos e as quedas.
 - Apenas um passageiro de cada vez.
 - Não tente efetuar uma inversão de marcha ou uma manobra de 360º num declive, rampa ou inclinação.
 - Não se coloque de pé sobre os apoios para os pés.
 - Nunca conduza esta cadeira em escadas rolantes ou normais.
- Tenha cuidado ao manobrar a cadeira, para evitar entalar os braços ou as mãos entre os apoios de braços e as paredes ou os rebordos das portas ao navegar em portas estreitas ou espaços apertados.
 - Evite espaços apertados.
- Exclusivamente para utilização quando os passageiros necessitam de assistência desde a sua cadeira de rodas pessoal até ao assento do avião. Concebida para facilitar a saída pelo corredor do avião. Não utilizar para o transporte geral de ponto a ponto no aeroporto.
- Nunca coloque crianças em cadeiras auto nesta cadeira.

4.0 Manuseamento e armazenamento:

- Não empilhe cadeiras umas em cima das outras.
- Mantenha as cadeiras no interior sempre que possível, protegidas das intempéries, para maximizar a sua vida útil.

5.0 Limpeza:

- Limpe entre utilizadores ou na presença de sujidade, utilizando um detergente de pH neutro e não corrosivo ou um desinfetante de baixo nível aprovado. Siga o rótulo de utilização do produto de limpeza para a diluição/tempo de contacto.
- Limpar apenas; não imergir em água. Evite solventes, abrasivos, lavagem a vapor/pressão e agentes corrosivos não aprovados.
- Após a limpeza, inspecione as peças críticas e retire de serviço se estiverem danificadas ou não funcionarem.

6.0 Informações sobre o fim de vida & a eliminação:

A vida útil prevista do dispositivo é de 10 anos. Esta duração de serviço baseia-se na avaliação do desgaste normal em condições típicas de utilização e com manutenção regular. Elimine a cadeira e os seus componentes de acordo com os regulamentos locais. Os componentes em fim de vida podem ser geridos através dos fluxos normais de resíduos sólidos ou de reciclagem. As almofadas e as peças têxteis podem ser recicladas nos programas existentes.

7.0 Declaração:



A Staxi Corp declara que os produtos acima mencionados cumprem as disposições da seguinte legislação da UE:

- Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos
- EN ISO 15223-1:2021 para símbolos
- EN ISO 20417:2021 para rotulagem



8.0 Aviso:

Se observar ou tiver um incidente grave com a cadeira de corredor Staxi, comunique o facto à Staxi e à autoridade competente do Estado-Membro em que se encontra.